

GO-ON



GEBRUIKERS HANDLEIDING

VERSIE 2025

1 Informatie

Inhoudsopgave	2
Veiligheidsinstructies & Service	3
Overzicht van onderdelen	4

2 Handelingen

.....	
Opvouwen	9
Accessoires	12
Opberghoes	12
Mand	13
Zadelpen met Gasveer	14
Magneet voor vouwstand	15
Uitvouwen	5
.....	

3 Onderhoud

Lezen voor gebruik

De GO-ON is een officieel erkend loophulpmiddel en mag in principe overal gebruikt worden waar lopen is toegestaan. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een toezichthouder (bijvoorbeeld politie of een winkeleigenaar) het hulpmiddel onterecht aanmerkt als een fiets. U kunt in dat geval uitleggen dat het gaat om een loophulpmiddel. Dergelijke situaties zijn hoogst ongebruikelijk. De fabrikant en verkoper zijn niet verantwoordelijk voor eventuele beperkingen of weigeringen die door derden worden opgelegd.

Waar je op moet letten:

- Maximaal gebruikersgewicht: 120 kg.
- De Go-On is een loophulp: je maakt vaart met je voeten en remt ook met je voeten.
- De handrem is bedoeld om stil te blijven staan, niet om tot stilstand te komen tijdens het rijden, gebruik daar je voeten voor. Niet bedoeld als step of voor steile hellingen.
- Wees voorzichtig in gebruik bij oneffen ondergronden, zoals bospaadjes en andere ruwe ondergronden.
-

Tips voor gebruik:

- Neem de tijd om je Go-On goed te leren kennen!
- Oefen eerst op een rustige plek voordat je de drukte ingaat.
- Controleer voor elk gebruik of alles goed vastzit (stuur, zadel, scharnierklem), vooral na het in- of uitklappen.

Servicepunt

Bij problemen of als er iets afgesteld moet worden, neem contact op met het verkooppunt waar je de Go-On hebt gekocht.

Contactgegevens verkooppunt:

Framenummer

Voor reparatie en onderhoud, registratie bij diefstal of voor het beantwoorden van vragen kan het mogelijk zijn dat er gevraagd wordt naar het framenummer van de GO-ON. Deze is te vinden aan de achterkant van het frame. Noteer hier eventueel ook het slotnummer.

Framenummer van mijn GO-ON:





DE GO-ON UITVOUWEN



Uitvouwen: Stap 1

Zorg dat er geen obstakels, mensen of spullen in de buurt staan, zodat je de Go-On veilig kunt



uitvouwen.

Uitvouwen: Stap 2

Gebruik je voet om de standaard uit te vouwen terwijl je de Go-On goed vasthoudt.



Uitvouwen: Stap 3

Vouw het frame van de Go-On gecontroleerd dicht, tot de twee helften van het scharnier tegen elkaar aan liggen.



DE GO-ON UITVOUWEN



Uitvouwen: Stap 4

Druk de scharnierklem stevig aan totdat je een 'klik' hoort om het frame vast te zetten.



Uitvouwen: Stap 5

Haal het stuur uit de stuurklem



Uitvouwen: Stap 6

Plaats het stuur recht in het frame



Uitvouwen: Stap 7

Zorg dat het voorwiel recht uitgelijnd is met het frame voordat je het stuur vastzet.

DE GO-ON UITVOUWEN



Uitvouwen: Stap 8

Gebruik de stuur snelspanner om het voorwiel vast te zetten.



Uitvouwen: Stap 9

Controleer of het stuur goed vastzit door het wiel met je voeten stil te houden en het stuur heen en weer te bewegen. Het stuur hoort niet te draaien als het wiel stilgehouden wordt.



Uitvouwen: Stap 10

Staat het stuur te los? Stel dan de snelspanner af door aan het moertje te draaien wanneer de spanner open is. Rechtsom draaien maakt de snelspanner strakker, linksom draaien maakt de snelspanner lossen.



Uitvouwen: Stap 11

Draai de zadel snelspanner los om het zadel te verstellen.

DE GO-ON UITVOUWEN



Uitvouwen: Stap 12

Beweeg het zadel omhoog tot de juiste hoogte.



Uitvouwen: Stap 13

De juiste hoogte is wanneer je op het zadel zit en beide voeten met gestrekte benen plat op de grond staan.



Uitvouwen: Stap 14

Druk de zadel snelspanner dicht om het zadel vast te zetten.



Gebruikstip:

Gebruik een stift om een streepje te zetten op de juiste hoogte, zodat je in de toekomst eenvoudig kunt zien op welke hoogte het zadel vastgezet moet worden.

Uitvouwen: Stap 15

Als het zadel te los zit, draai dan de zadel snelspanner aan (zie stap 10).



Uitvouwen: Stap 16

Controleer nog een laatste keer of alles vastzit en dan is je GO-ON klaar voor gebruik.

DE GO-ON OPVOUWEN



Opvouwen: Stap 1

Zorg dat er geen obstakels, mensen of spullen in de buurt staan, zodat je de Go-On veilig kunt opvouwen.



Opvouwen: Stap 2

Beweeg het knopje op de scharnierklem naar achteren om het scharnier te kunnen openen.



Opvouwen: Stap 3

Open de scharnierklem volledig.



Opvouwen: Stap 4

Vouw de GO-ON op door de twee delen van het frame naar elkaar toe te bewegen.

DE GO-ON OPVOUWEN



Opvouwen: Stap 5

Zet de GO-ON op de grond. In veel gevallen is de de GO-ON nu al klein genoeg opgevouwen om verplaatst te worden.

Ga door met stap 6 om de GO-ON tot de kleinste stand op te vouwen.



Opvouwen: Stap 6

Open de stuur snelspanner.



Opvouwen: Stap 7

Haal het stuur uit het frame.



Opvouwen: Stap 8

Klik het stuur vast in de stuurklemmen.

DE GO-ON OPVOUWEN



Opvouwen: Stap 9

Open de zadel snelspanner.



Opvouwen: Stap 10

Zet het zadel in de laagste stand, en gebruik de snelspanner om het vast te zetten.



Opvouwen: Stap 11

De GO-ON is klaar om te vervoeren! Pak de GO-ON altijd bij het zadel vast wanneer je deze verplaatst.



Opbergen in hoes: Stap 1

Volg de stappen van het handboek om de GO-ON op de juiste manier op te vouwen.

Open de hoes en zet de GO-On er in, met het zadel naar voren.



Opbergen in hoes: Stap 2

Rits de hoes dicht. Maar houd het zadel buiten de hoes als de GO-ON nog verplaatst moet worden. Rits daarna de hoes volledig dicht.



! Let op !

Til de GO-ON niet op aan de hoes, maar aan het zadel



Mand bevestigen: Stap 1

Pak de mand erbij, en controleer of de Klikfixadapter bevestigd is.



Mand bevestigen: Stap 2

Haak de mand schuin in de Klikfix-adapter.



Mand bevestigen: Stap 3

Beweeg de mand naar beneden, wanneer je een klik hoort is de mand correct bevestigd.



Zadelpen met Gasveer: Stap 1

Wanneer de GO-ON is aangeschaft met de optie zadelpen met gasveer, zit er een hendel onder het zadel in plaats van een snelspanner.



Zadelpen met Gasveer: Stap 2

Druk de hendel in om het zadel omhoog te bewegen. Dit systeem werkt zoals een bureaustoel.



Zadelpen met Gasveer: Stap 3

Druk de hendel in terwijl je op het zadel zit om het naar beneden te bewegen.

Zie pagina 8 (uitvouwen: stap 13) voor het bepalen van de juiste hoogte van het zadel.



Magneet voor vouwstand: Stap 1

De magneet heeft geen invloed op de manier waarop de GO-ON opgevouwen hoeft te worden.

Volg de stappen voor het opvouwen zoals in deze handleiding beschreven vanaf pagina 9.



Magneet: Stap 2

In de dichtgevouwen stand helpt de magneet om de GO-ON in de ingevouwen stand te houden.

Schoonmaken

Maak de Go-On schoon met water, zonder schoonmaakmiddelen te gebruiken. Dit voorkomt beschadiging

ONDERHOUD

van het materiaal en houdt de GO-ON in goede staat. Spoel vuil voorzichtig weg en droog de GO-ON daarna af met een handdoek.

Opslag

Bewaar de GO-ON op een droge plek. Vocht kan de levensduur van de GO-ON korter maken. Zorg dat de GO-ON niet nat blijft staan of in een vochtige omgeving wordt opgeslagen.

Remkabel afstellen

Controleer regelmatig de remmen. Als de remkracht afneemt, kan het nodig zijn om de remkabel bij te stellen. Draai het stelmoertje (zie afbeelding onderaan de pagina) aan de remkabel totdat de rem weer goed en direct reageert. Test na het afstellen altijd of de rem veilig werkt voordat je weer gaat rijden.

